



Correction des défauts de déglutition chez l'enfant et l'adolescent

Froggy Mouth®


Froggy Mouth® est un système physiologique, efficace et économique pour corriger les défauts de déglutition chez l'enfant et le jeune adolescent. Petit appareil souple et amovible, la simplicité d'utilisation du Froggy Mouth® et son design unique peu invasif permettent une adaptation rapide et une coopération minimale de la part du patient.



Froggy Mouth® est un système efficace et physiologique pour corriger les défauts de déglutition chez l'enfant

Objectifs du traitement

Froggy Mouth® oblige les lèvres à rester détendues lors de la déglutition. L'absence d'un contact bi-labial interdit toute possibilité de réaliser une pression négative à l'intérieur de la cavité buccale et, par conséquent, le recours à la succion déglutition lorsque l'enfant avale sa salive.

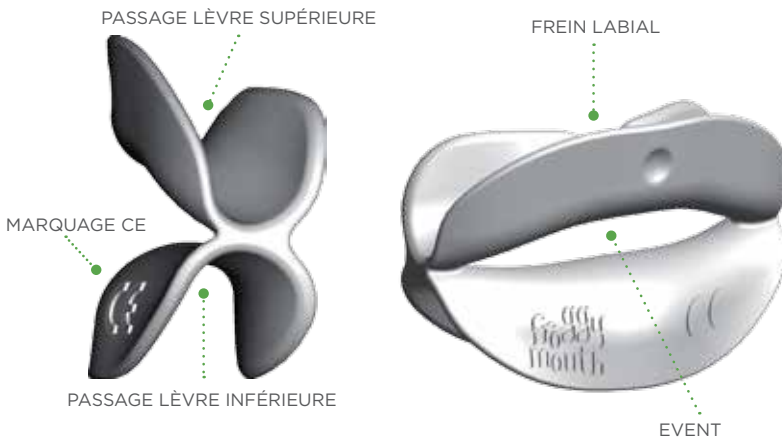

Résultats Positifs

Depuis plus de 5 ans, le principe de la déconnexion de la syncinésie lèvre/langue et la détente labiale ont été testés avec succès au CHU Robert Debré de Paris. Les patients suivis dans cet hôpital obtenaient généralement des résultats plus rapidement lorsqu'ils étaient proches de l'âge d'acquisition physiologique (4 à 6 ans). Patients comme docteurs sont satisfaits de ce petit appareil amovible.

Design de grande qualité

L'appareil Froggy Mouth® est fabriqué à partir de matériaux de grande qualité (élastomère thermoplastique sans latex ni phtalates), créé spécialement pour favoriser le confort et l'efficacité. Fabriqué en France, Froggy Mouth® est un dispositif de classe I qui satisfait aux dispositions applicables de la Directive 93/42/CEE, et du livre II du code de la santé publique. Le processus de stérilisation est identique à celui des autres instruments : mettre l'appareil dans un sachet de stérilisation dans un stérilisateur pendant 25 minutes à 135°C.

Pour plus d'information, contactez votre représentant DENTSPLY GAC.

Cet appareil est disponible pour tous les praticiens s'intéressant à la rééducation fonctionnelle.

Froggy Mouth® est disponible en 3 tailles :

Pedo Small (3-6 ans) :	■ Beu	Ref: 737_501
Pedo Large (6-13 ans) :	■ Rouge	Ref: 737_502
Ado (à partir de 13 ans) :	■ Violet	Ref: 737_503

Un kit intro eco de 12 pièces :

Pedo Small	x 4	
Pedo Large	x 4	Réf : KIT737-FROGGY
Ado	x 4	

Caractéristiques et avantages

- Temps de traitement limité: Seulement 15 minutes par jour
- Facilité d'utilisation : Les patients portent l'appareil lors d'une activité ludique comme la console, la télévision ou la lecture
- Stimulant les circuits de l'automatisme, il requiert une coopération minimale de la part du patient

Indications

En interception :

L'appareil peut être utilisé :

- En tant que traitement seul
- en soutien d'une rééducation orthophonique

En conjonction :

- en accompagnement des thérapeutiques d'expansion
- proposé dans le traitement multi-attaches des supraclusives afin de diminuer le risque des résorptions radiculaires et les récives en améliorant la qualité du traitement.



The trademarks and names of other companies and products mentioned herein are the property of their respective owners.

CE Fabriqué en France

DENTSPLY GAC
1, rue des Messagers | CS20115
F-37210 Rochecorbon | France
Tél : +33 (0)2 47 40 23 30
gac-fr.info@dentsply.com
www.dentsplygac.eu

Froggy Mouth® est un dispositif médical de classe I pour soins buccaux dentaires réservé aux professionnels de santé, **indiqué pour** la rééducation de la déglutition. **Classe** : I. **Organisme certificateur** : Auto certifié par la société BEA. **Fabriqué par** BEA Bloc Express Assistance. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice (ou sur l'étiquetage) avant toute utilisation. Non remboursé par la Sécurité Sociale.

DENTSPLY
GAC

Ensemble, faire progresser l'orthodontie